

# Note d'information

## Recherches de cryoglobulines - cryofibrinogène

### Rappel des bonnes pratiques

Il est **IMPERATIF** d'utiliser le matériel de prélèvement pré-chauffé inclus dans la malette isotherme et seulement celui-ci.

La phase de prélèvement est fondamentale pour la recherche d'une cryoglobuline ou d'un cryofibrinogène. Il est nécessaire de respecter les points suivants, mentionnés sur le **formulaire de demande** (inclus dans la malette de prélèvement) :

- La malette isotherme pour recherche de cryoglobulines est à récupérer au laboratoire à **partir de 8h00** et **en semaine seulement** afin de garantir une délivrance correcte par le personnel du laboratoire,
- Le patient doit être **impérativement à jeun** depuis 12h,
- Le prélèvement doit être réalisé **exclusivement avec le matériel pré-chauffé inclus** dans la malette (aiguilles, corps de pompe, adaptateur, tubes) et sorti au dernier moment,
- Le formulaire de demande inclus dans la malette doit être renseigné par le préleveur, y compris l'**heure de prélèvement**,
- Les tubes prélevés sont à **retourner rapidement au laboratoire** dans la malette isotherme afin de garantir un maintien de la température lors du transport.

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter les biologistes du laboratoire.