

Seringue de gaz du sang *safePICO Aspirator* sans aiguille

956-622



Fig. 1

Avant le prélèvement :

Enlever la seringue du sachet

Pousser le piston jusqu'à la butée



Fig. 5

Tapoter le corps de la seringue pour libérer les bulles d'air (seringue verticale)

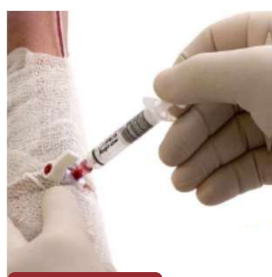


Fig. 2

Purger plusieurs fois le cathéter et adapter la seringue sur le robinet

Si besoin, adapter une aiguille

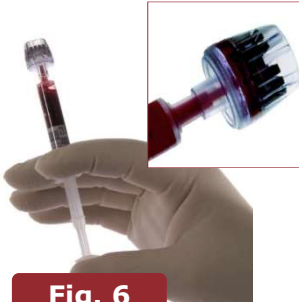


Fig. 6

Purger les bulles d'air jusqu'à remplir entièrement le bouchon de sang

Exercer une pression lente sur le piston jusqu'à la butée

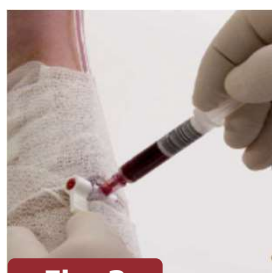


Fig. 3

Prélèvement :

Tirer doucement le piston pour remplir la seringue avec **0,7 mL au minimum**



Fig. 7

Agiter la seringue pendant **au moins 20 secondes** dans les deux axes pour dissoudre l'héparine



Fig. 4

Après le prélèvement :

Bien enfoncer le bouchon et tourner d'un quart de tour



Fig. 8

Analyser l'échantillon dans un délai de **30 min maximum**